


Manual de Utilização do modo de Stitching no Software O&R


1 – Abra o Software O&R




2 – Não é necessário login, pode clicar em login que o software entrara automático.

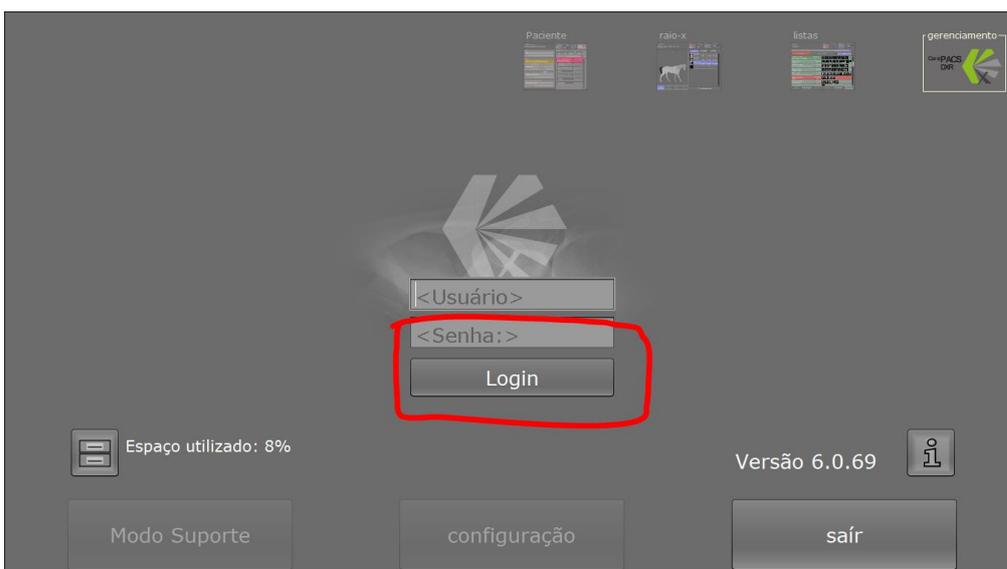

3 – Clique no ícone de listas:

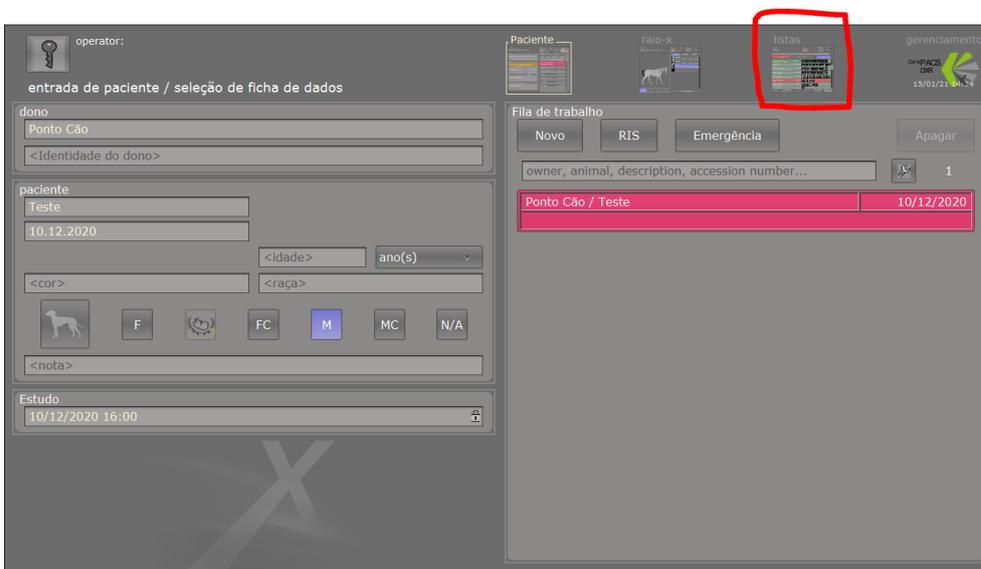


4 – Selecione o paciente e depois clique em “Mostrar no Visualizador”:

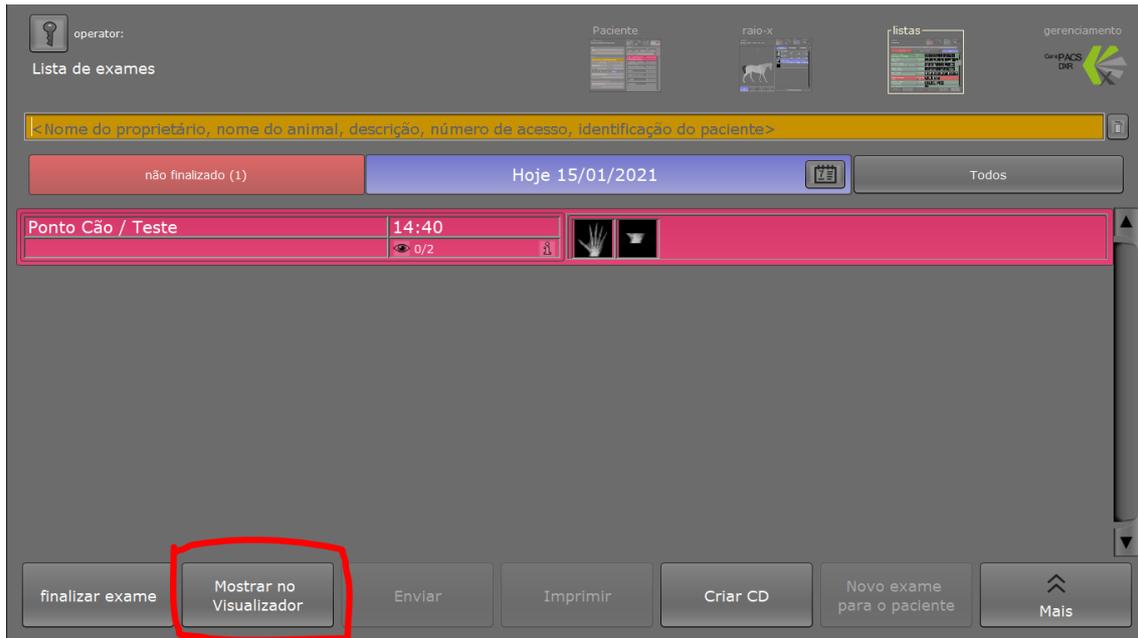

5 – Na ultima opção “Gerenciamento” clique na seta para esquerda para abrir o menu:



6 – Clique na Opção de “Criar Imagem por Costura”:

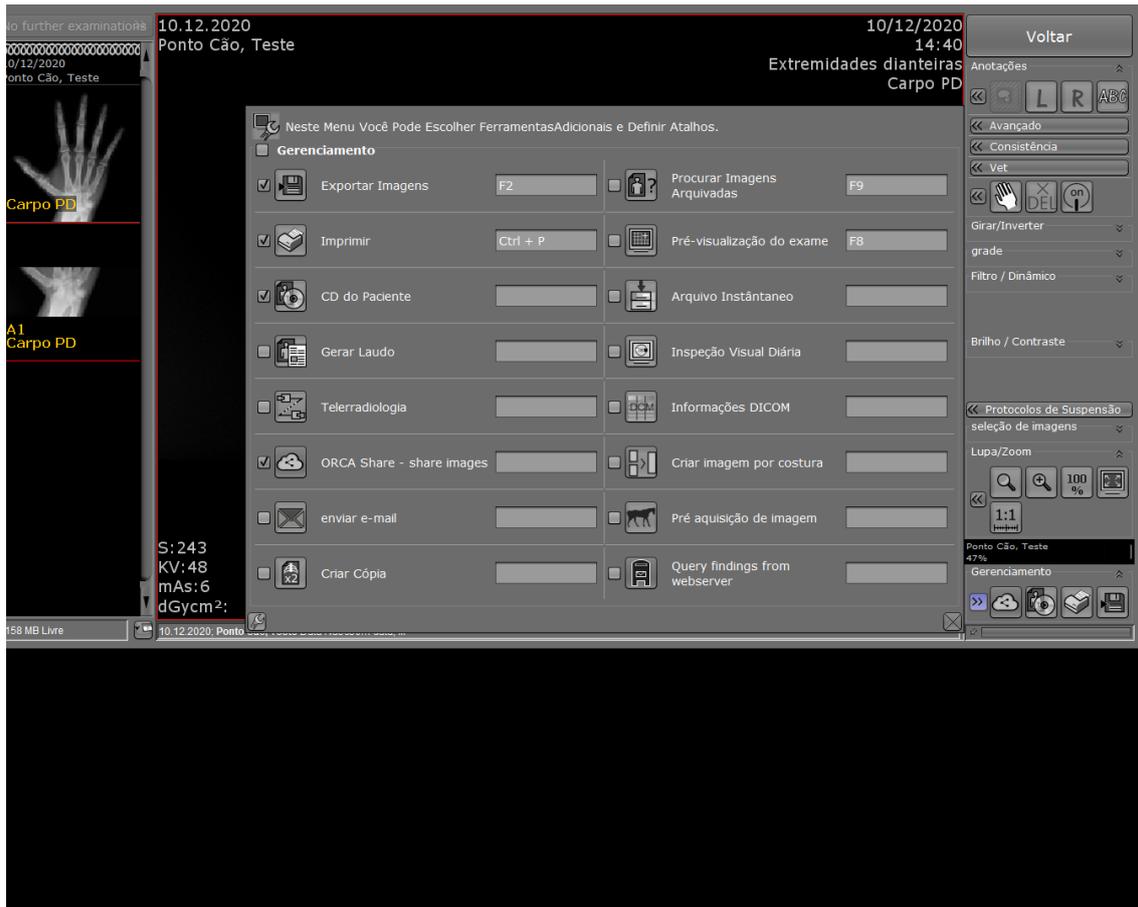

7 – Irá abrir a janela abaixo, após isso você seleciona as imagens e o tipo de alinhamento (horizontal/vertical), após seleciona tudo clique em executar para montar as imagens:



8 – As imagens foram montadas, utilizando a barra inferior você pode ajustar conforme necessário e depois finalizar a montagem:

